

#EPI

# Como e quando usar a máscara de proteção respiratória PFF2 N95

Fonte: Agência Nacional de Vigilância Sanitária



A máscara de Proteção PFF2 N95 foi desenvolvida para defesa respiratória do usuário em ambientes hospitalares, clínicos e com aglomeração de pessoas. Ela auxilia na proteção contra o contágio de doenças infectocontagiosas através de partículas e vapores tóxicos. Possui filtro eficiente para retenção de contaminantes presentes na atmosfera sob a forma de aerossóis.

## Antes de colocar uma máscara

Lave as mãos com água e sabão ou álcool em gel



## Para tirar a máscara

Remova a máscara por trás usando as cordas. Não toque a frente da máscara

A máscara N95 ou equivalente poderá ser reutilizada pelo mesmo profissional, desde que sejam cumpridos passos obrigatórios para a retirada da máscara sem a contaminação do seu interior.

## Modo de usar

Segure a máscara e deixe prender os elásticos de cabeça para baixo

Encaixe a máscara sob o queixo, puxando a alça menor, posicionando-a na nuca

Ajuste a alça maior sobre a cabeça e pressione o clip ajustando-o ao nariz

Após o ajuste, cubra a máscara com as mãos e expire fortemente.

Caso o ar escape pelas extremidades da máscara, repita as fases anteriores com maior cuidado.

Com objetivo de minimizar a contaminação a máscara N95 tem durabilidade de um mês, a depender da frequência do uso, tipo de situação e conservação.

Deve armazenar a mesma em local seco, envolta em papel ou folha sulfite. Não guardá-la saco plástico, a umidade favorece o crescimento de fungos;

